



MANUEL
D'UTILISATION

percko.com/wavii



Contact

PERCKO

178 rue du faubourg Saint-Denis

75010 Paris, France

Téléphone : 01 76 54 10 62

Email : contact@percko.com

Site internet : www.percko.com

Bienvenue dans l'univers Wavii, une toute nouvelle façon d'appréhender votre posture et une solution originale pour retrouver un dos en pleine forme.

Le contenu de votre manuel et de votre guide de démarrage rapide peut différer en fonction de votre version logicielle et faire l'objet de modifications sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE LA BOÎTE.....	1
PATCHS ADHÉSIFS HYPOALLERGÉNIQUES.....	2
REMPACEMENT DE LA PILE.....	4
SPÉCIFICATIONS.....	5
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.....	6

Cependant, si vous remarquez une irritation de la peau ou tout autre symptôme, nettoyez votre peau à l'eau claire et au savon.

Contactez un médecin si les symptômes persistent. Les patchs adhésifs ne doivent pas être posés sur une plaie ou une peau abîmée. En cas de contact avec les yeux, tenez vos paupières ouvertes et rincez abondamment à l'eau claire pendant au moins 15 minutes.

Contactez un médecin si une douleur ou une rougeur persiste.

LINGETTES DESINFECTANTES

Usage externe uniquement, ne pas utiliser pour la désinfection des plaies.

Chaque pays de l'Union Européenne a ses centres de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations concernant la localisation des centres de recyclage, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit.

PATCHS ADHÉSIFS HYPOALLERGÉNIQUES

Les patchs adhésifs hypoallergéniques de Wavii sont fabriqués à partir de silicone de grade médical. Évitez leur utilisation si vous présentez une allergie au silicone. Les patchs ont été testés et ne devraient pas causer d'irritation.

CONTENU DE LA BOÎTE

-  1 Wavii
-  3 piles longue durée (3x3 mois)
-  1 coque de protection
-  1 pochette de transport
-  6 patchs adhésifs hypoallergéniques (6x10 jours)
-  6 lingettes désinfectantes
-  1 guide de démarrage rapide
-  1 manuel d'utilisation

PATCHS ADHÉSIFS HYPOALLERGÉNIQUES

Nos patchs sont fabriqués en France, en silicone de grade médical. Ils sont hypoallergéniques, réutilisables et repositionnables pendant 10 jours avec un bon entretien.

ENTRETIEN

Après quelques jours d'utilisation, si vos patchs sont moins adhérents, vous pouvez les nettoyer avec les lingettes désinfectantes fournies. Vous pouvez éventuellement utiliser un peu d'eau et du savon en veillant à ne pas mettre d'eau entre le patch et Wavii, au risque de l'endommager. Bien sécher avant réutilisation.

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit en revanche être disposé dans un centre de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques qui contribue à la conservation des ressources naturelles.

En recyclant ce produit et ses piles de façon appropriée, vous participez à l'effort de réduction des conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé humaine qui pourraient être causées par une gestion inadéquate.



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.



Mise au rebut des piles usagées.
Si ce produit contient des piles, elles ne doivent pas être jetées avec les autres déchets ménagers. Elles doivent en revanche être déposées dans un bac de recyclage adéquat. Ces piles ne contiennent pas de mercure, de cadmium, ou de plomb en quantité supérieure à celle définie dans la directive relative aux piles 2006/66/EC.



ASTUCE

N'oubliez pas de replacer la coque de protection sur votre Wavii pour prolonger la durée de vie de vos patchs. Vous les protégez ainsi de la saleté et évitez qu'ils ne s'assèchent et perdent leur pouvoir adhésif.

ACHAT

Des recharges de patchs et lingettes sont en vente depuis la section mon compte de votre application ou sur notre site internet : www.percko.com/wavii

REEMPLACEMENT DE LA PILE

- Dévissez la trappe à l'arrière de votre Wavii dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de 2 centimes
- Retirez la pile usagée et recyclez-la
- Placez la nouvelle pile avec le «+» vers le haut
- Remplacez la trappe puis serrez en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
- Chaque pile dure en moyenne 3 mois
- Des piles malmenées peuvent présenter un risque de feu ou de brûlure chimique
- Ne pas tenter de démonter ou exposer à des matériaux conducteurs, à de l'humidité, des liquides ou une température supérieure à 55°C
- Ne pas utiliser si elle semble fuir, décolorée, déformée ou anormale de quelque façon que ce soit
- Ne pas court-circuiter
- La durée de vie d'une pile varie selon son utilisation
- Les piles non fonctionnelles doivent être jetées selon les dispositions de la loi. Si aucune loi ou réglementation ne le régit, jetez-les dans une poubelle dédiée aux électroniques
- Ne pas essayer de recharger la pile
- Garder hors de portée des enfants

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Wavii n'est pas un dispositif médical.

- Ne pas ouvrir ou altérer l'intégrité du produit sauf pour retirer et insérer une pile
- Ce produit est sûr dans le cadre d'une utilisation normale et prévue
- Ne pas utiliser de nettoyants agressifs comme l'eau de javel sur Wavii
- Ne pas exposer votre Wavii à des produits chimiques comme des liquides inflammables
- Si vous ressentez un inconfort, des démangeaisons ou irritations au contact de Wavii, arrêtez l'usage de votre appareil et contactez notre équipe d'assistance

NOTICE DE SÉCURITÉ

Prenez le temps de lire, comprendre et suivre toutes les informations de sécurité contenues dans ce manuel avant d'utiliser votre Wavii. Veuillez garder ces instructions pour des consultations futures.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui pourrait entraîner la mort ou d'importantes blessures et/ou des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui pourrait entraîner une blessure mineure ou modérée et/ou des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

ATTENTION :

- Contient de petites pièces, garder hors de portée des enfants
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu comme décrit dans ce manuel
- Ne pas poser sur une surface mouillée par de l'eau ou des produits d'entretien
- Ne pas entrer dans des zones où l'usage d'émetteurs est interdit, l'usage en avion est autorisé

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES :

- Des piles utilisées de manière inappropriée peuvent présenter un risque de fuite ou d'explosion et de blessure

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (mm)	49,3 x 34,5 x 7
Poids (gr)	10
Bluetooth®	BLE-Bluetooth Low Energy 4.0
Piles	CR2032 3V 220mAh, 0,660W

Configuration smartphone

Système iOS 10 / Android 4.4 et versions ultérieures

Garantie

Wavii est garanti 2 ans. En cas de souci, retournez votre produit avec sa preuve d'achat (ticket de caisse ou facture digitale).

Pour le détail de la garantie, se référer aux « conditions de garantie » sur le site internet percko.com/wavii.