

## GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Lors d'une action en matière de garantie légale de conformité, le client :

- bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis de son Vendeur ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coûts prévus par l'article L. 217-9 du Code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d'occasion ou « reconditionnés », où ce délai est fixé à six (6) mois.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. La mise en œuvre de la garantie a lieu sans frais.

Vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil et, dans cette hypothèse, vous pouvez choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix conformément à l'article 1644 du Code civil. L'action résultant des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.

*Pour bénéficier de la garantie, vous devez aviser Lili light for Life, dès la constatation des défauts imputés au produit et au plus tard dans un délai d'un mois, par mail [serviceclient@liliforlife.com](mailto:serviceclient@liliforlife.com) ou par courrier recommandé à l'adresse suivante :*

### Service retour produit

5, allée de la grande treille,  
bureau 3  
35200 Rennes

Pour toute question sur l'utilisation de la lampe Lili ou sur ses réglages via l'application Lili for Life, nous vous invitons à prendre contact avec le service clients :

par mail : [serviceclient@liliforlife.com](mailto:serviceclient@liliforlife.com)

ou par téléphone : +33 (0)2 78 92 00 10.

N'hésitez pas à nous contacter :

[contact@liliforlife.com](mailto:contact@liliforlife.com)

Plus d'informations sur

[www.liliforlife.com](http://www.liliforlife.com)



### Caractéristiques:

Longueur x largeur x hauteur : 160 x 70 x 40 mm  
Poids : 240 g

### Performances :

Classe énergétique : A  
Efficacité lumineuse : 40 lm/W  
Flux lumineux max : 100 lm  
Température de couleur : 4000 K  
Indice de rendu des couleurs : > 95  
Classification de la lampe : RG0

### Normes :

EN613-47-2-13 • EN60598-1 • EN60598-2-4 • EN62471 • EN62493  
• EN55015 • EN61000-3-2 • EN61000-3-3 • EN61547

Garantie : 2 ans

### Source LED :

Fabricant : Nichia  
Durée de vie L70 : 4000h

### Caractéristiques électriques :

Tension d'entrée : 5VDC  
Temps de charge : 6h  
Autonomie : 6h (luminosité faible)  
Batterie : 3200mAh

V.2.1



**Lili**  
light for life

## NOTICE D'UTILISATION ET CONDITIONS DE GARANTIE



**Avec Lili,**  
je lis et je revis

Avant toute utilisation de la lampe Lili, veuillez lire attentivement cette notice et conservez-la afin de vous y référer en cas de besoin.

## Lili, la lampe qui facilite la lecture des personnes dyslexiques

### ÉTAPE 1 : METTRE LA LAMPE À CHARGER

Avant toute utilisation, mettez la lampe à charger pendant 8 heures. Veillez à utiliser uniquement le chargeur fourni avec la lampe. En fonction de l'intensité d'éclairage choisie, l'autonomie de la lampe Lili sera plus ou moins longue. Pour l'intensité la plus faible, l'autonomie est d'environ 6 heures.



**ATTENTION :** lorsque la charge de la batterie devient insuffisante, la lampe se met à clignoter. Il faut alors la recharger.

### ÉTAPE 2 : INSTALLER L'APPLICATION

Pour personnaliser les réglages de la lampe, il faut installer l'application **Lili for Life**, disponible sous Android et IOS et à télécharger sur Google Play Store ou App Store.



Scannez le QR code pour installer l'application



### ÉTAPE 3 : CONNECTER LA LAMPE À L'APPLICATION

Une fois la lampe chargée, activez le Bluetooth et le GPS du smartphone sur lequel l'application a été téléchargée et ouvrez l'application. Cliquez sur le logo  pour rechercher votre lampe puis allumez-la sur le 1<sup>er</sup> cran de luminosité.



**ATTENTION :** la lampe ne doit pas être branchée sur la prise électrique lors de cette opération.

Connectez votre portable à votre lampe Lili. Vous pouvez maintenant procéder aux réglages de votre lampe via l'application.

### ÉTAPE 4 : TESTER LES RÉGLAGES



Avant d'allumer votre lampe, installez-vous confortablement sur une table avec un document écrit et privilégiez une place peu éclairée (par lumière naturelle comme artificielle). En effet, une luminosité trop forte ou de mauvaise qualité peut altérer l'impact des flashes lumineux de la lampe et diluer l'effet stroboscopique, réduisant ainsi l'efficacité de la lampe. Pour vérifier vos sources lumineuses, vous pouvez utiliser votre smartphone en mode selfie : la présence de bandes de défilement ou de « papillonnement » indique que les conditions d'utilisation ne sont pas optimales. Dans ce cas, réduisez l'éclairage extérieur ou déplacez vous dans un endroit moins éclairé.

Allumez la lampe et réglez l'intensité lumineuse : la lampe dispose d'un bouton sur le côté avec 4 crans de luminosité (de gauche à droite).



Puis ouvrez l'application sur votre smartphone afin de prendre le contrôle de la lampe et de procéder au réglage. Différents réglages vous permettent de vous approprier au mieux votre lampe Lili en personnalisant :

- La Vitesse (Hertz) : 60 Hz à 120 Hz
- La Balance : 15% à 20%

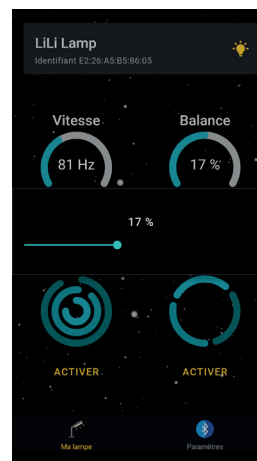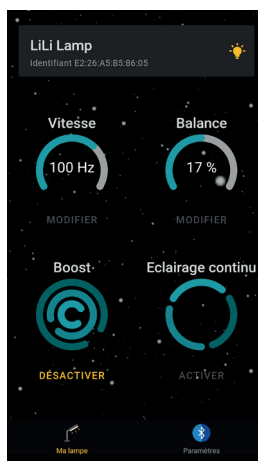

Sélectionnez un paramètre à régler en appuyant sur « Modifier » : augmentez ou diminuez progressivement le paramètre choisi afin de trouver le réglage offrant le maximum d'efficacité et de confort pour la lecture.

- Le mode **Boost (optionnel)** permet d'optimiser l'effet, sur la durée, des réglages retenus.

- Une option « **Eclairage continu** » est proposée : cette option coupe les réglages de vitesse et balance, supprimant ainsi les flashes lumineux. Elle agit donc comme un placebo et permet de se rendre compte de l'efficacité de la lampe.

### ÉTAPE 5 : SAUVEGARDER VOS PRÉFÉRENCES

Vous pouvez éteindre votre lampe Lili et fermer l'application Lili for Life dès que vous avez trouvé les réglages qui vous conviennent le mieux. Vos paramètres personnalisés s'enregistrent automatiquement : vous n'avez alors plus besoin d'ouvrir l'application pour utiliser la lampe. Si par la suite, vous souhaitez tester de nouveaux réglages, il vous suffit de connecter à nouveau votre lampe à l'application Lili for Life et d'ajuster vos paramètres.



### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lisez attentivement la présente notice avant toute utilisation.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec la lampe.
- Protégez la lampe de toute source d'humidité et de tout contact avec l'eau. Utilisez la lampe et son chargeur uniquement à l'intérieur.
- La lampe doit être protégée des chocs et ne pas être exposée à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 40°C.
- Pour éviter d'endommager la lampe Lili, il est impératif de la transporter dans son étui de protection.
- **Contre-indiqué pour les personnes souffrant ou susceptibles de souffrir de crises d'épilepsie (en cas de doute, consultez votre médecin).**
- N'essayez jamais de réparer la lampe ou le chargeur, ou de changer vous-mêmes les LED. Prenez contact avec le service clients Lili dont les coordonnées figurent dans cette notice.



RECYCLAGE

Cet appareil doit être éliminé séparément des autres déchets. Recyclez la lampe selon la réglementation des composants électroniques et électriques en vigueur.