

HYPERTENSION & AUTOMESURE



La SFHTA* et l'HAS** recommandent⁽⁴⁴⁾


- l'utilisation d'un **tensiomètre électronique validé, de préférence brassard**
- de prendre les mesures en position assise, au repos avec l'avant-bras posé sur une table
- de respecter la « règle des 3 » :
 - 3 mesures le matin avant le petit déjeuner et la prise de médicaments, en espaçant les mesures de quelques minutes
 - 3 mesures avant le coucher,
 - 3 jours de suite

L'automesure de la pression artérielle est utile pour :

- Confirmer le diagnostic établi par le médecin et dépister l'hypertension de consultation***avant la délivrance de médicaments.
- Détecter l'hypertension masquée.
- Evaluer l'efficacité du traitement.

* Société Française d'Hypertension Artérielle ** Haute Autorité de Santé

*** Appelée également hypertension « blouse blanche » : pression artérielle élevée au cabinet médical, mais normale à domicile.

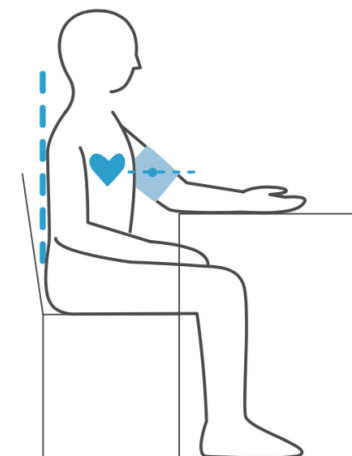

POINTS FORTS DES TENSIONNÈTRES OMRON

VALIDATIONS CLINIQUES

Modèle	Validé cliniquement pour la population générale ⁽²⁸⁾	Validé cliniquement pour les diabétiques ⁽²⁹⁾	Validé cliniquement pour la femme enceinte ⁽³¹⁾	Validé cliniquement pour les personnes obèses ⁽³⁰⁾
EVOLV	●		●	
M7 Intelli IT	●	●		
M3 Comfort	●		●	
M2	●			
M2 Basic	●			
RS7 Intelli IT	●			●
RS4	●			
RS2	●			

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES



Brassard Intelli Wrap et son capteur à 360°

Une personne sur trois ne mesure pas sa tension correctement. Le brassard Intelli Wrap est l'innovation d'OMRON qui permet d'obtenir des **mesures fiables quelle que soit la position du brassard autour du bras**⁽³⁶⁾.



Technologie Intellisense™, pour tous les tensiommètres OMRON,

Permet un gonflage personnalisé du brassard ou du bracelet et assure une prise de tension rapide et confortable.



OMRON connect (disponible pour tensiommètres connectés, tels que EVOLV, M7 Intelli IT et RS7 Intelli IT)

Application (pour IOS et Android) qui permet à l'utilisateur d'enregistrer, suivre et partager ses mesures avec son médecin. Connexion en bluetooth du tensiommètre à une tablette ou smartphone.

FACILITÉ D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran et touches larges
- Nombreux indicateurs et icônes pour guider l'utilisateur et faciliter l'interprétation des résultats. Par exemple :

SYS Indicateur à LED d'hypertension

Indicateur d'hypertension

Indicateur de l'hypertension matinale

Indicateur de battement irrégulier

Détection des mouvements du corps

Capteur de positionnement avancé

Guide de positionnement du brassard

OMRON CONNECT

Grâce à OMRON connect et à votre appareil connecté OMRON, finies les contraintes : plus de difficulté à lire les informations à l'écran, plus besoin de noter ses résultats avec le risque de faire des erreurs, plus de risque de perdre ses données ou de ne pas avoir son bloc note sous la main le moment voulu




Installation simple et rapide
Synchronisation rapide et automatique avec votre smartphone.
 L'appareil transfère automatiquement les mesures sur votre smartphone via l'application mobile préalablement installée. Toutes vos données sont ainsi mémorisées sur votre smartphone.

Facile à utiliser et intuitive, OMRON connect propose des modes d'emploi conviviaux pour chaque fonctionnalité.


Affichage clair des résultats
 pour une bonne compréhension et un suivi facile des évolutions.

Possibilité d'organiser la présentation des écrans en fonctions de vos objectifs prioritaires.

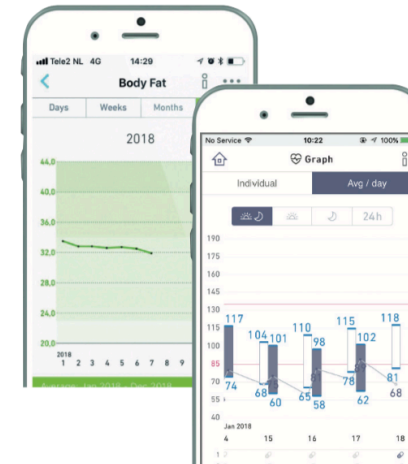

Suivi de l'évolution des résultats dans la durée : enregistrements, moyennes et bilans, graphiques, tendances, valeurs cibles...

Afin d'améliorer l'observance des traitements, OMRON connect propose aussi des **rappels pour la prise de médicaments.**

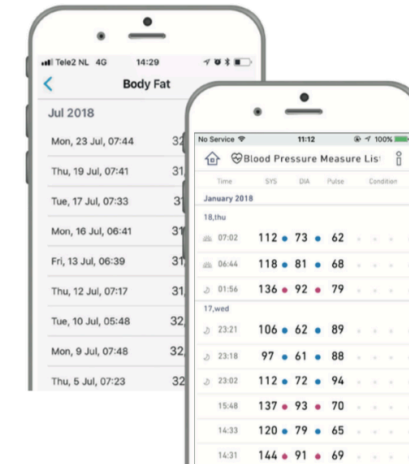

Partage facile des résultats et communication avec, selon le cas, son médecin, son nutritionniste ou son coach, sans nécessairement avoir à se déplacer à son cabinet.

TENSIOMETRES OMRON : UNE GAMME COMPLÈTE

OMRON



Modèle	OMRON EVOLV	M7 Intelli IT	M3 Comfort	M2	M2 Basic	RS7 Intelli IT	RS4	RS2
	★★★★ SUPER PREMIUM	★★★ PREMIUM	★★ MEDIUM	★★ MEDIUM	★ ACCESS	★★★ PREMIUM	★★ MEDIUM	★ ACCESS
Type	BRASSARD					POIGNET		
Brassard Intelli Wrap	●	●	●	-	-	-	-	-
Connecté via l'application OMRON connect	●	●	-	-	-	●	-	-
Validé cliniquement ⁽²⁸⁾	●	●	●	●	●	●	●	●
Validé cliniquement spécifiquement pour	femmes enceinte et pré-éclampsie ⁽³¹⁾	diabétiques ⁽²⁹⁾	femmes enceintes et pré-éclampsie ⁽³¹⁾	-	-	personnes obèses ⁽³⁰⁾	-	-
Moyenne de 3 mesures en 10 mn	-	●	●	-	-	●	●	-
Moyenne de 3 mesures matin et soir Valeur moyenne hebdomadaire	-	●	-	-	-	-	-	-
Suivi de l'hypertension matinale	-	●	-	-	-	●	●	-
Indicateur d'hypertension matinale	-	-	-	-	-	●	●	-
Indicateur d'hypertension	-	● En couleur à LED	● En couleur à LED	●	-	●	●	●
Indicateur de battement irrégulier	●	●	●	●	-	●	●	●
Indicateur d'installation correcte	●	●	●	●	-	●	●	●
Détection des mouvements du corps	●	●	●	-	-	●	●	-
Capteur de positionnement avancé	-	-	-	-	-	● Lumineux	●	-
Indicateur de dégonflement du bracelet	-	-	-	-	-	●	●	●
Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)	●	●	●	●	●	●	●	●
Mémoires	100*	2 x 100	2 x 60	30	Garde en mémoire la dernière mesure	2 x 100	60	30
Taille du brassard ou du bracelet	Médium/Large Préformé 22-42 cm	Médium/Large Préformé 22-42 cm	Médium/Large Préformé 22-42 cm	Médium Souple 22-32 cm	Médium Souple 22-32 cm	Souple 13,5 - 21,5 cm	Préformé 13,5 - 21,5 cm	Préformé 13,5 - 21,5 cm

* 100 mesures stockées dans la mémoire interne de l'appareil. Nombre illimité de mesures enregistrées dans l'application OMRON connect

QUEL TENSIOMÈTRE RECOMMANDER POUR QUEL PROFIL ?

OMRON propose une gamme de tensiomètres segmentée par profil patient ou consommateur pour vous aider à conseiller le bon tensiomètre selon la typologie de client, et ainsi vous permettre de **développer votre marché et vos ventes**.



OMRON

TYPES DE PROFILS	SELON LA CONDITION MEDICALE DU PATIENT				SELON LES HABITUDES ET STYLE DE VIE			
	Patients diagnostiqués hypertendus	Patients diabétiques	Personnes fortes ou obèses IMC > 30	Femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie	Utilisateurs amateurs de produits connectés	Sportifs ou personnes nomades	Personnes ayant un besoin occasionnel avec un petit budget	Personnes désirant suivre leur tension en prévention
TENSIOMÈTRES LES PLUS ADAPTÉS	 EVOLV	 M7 INTELLI IT Validation clinique spécifique pour les diabétiques ⁽²⁹⁾		 EVOLV Validation clinique spécifique pour la femme enceinte ⁽³¹⁾	 EVOLV	 EVOLV	 M2 BASIC	 M3 COMFORT
	 M7 INTELLI IT			 M3 COMFORT Validation clinique spécifique pour la femme enceinte ⁽³¹⁾	 M7 INTELLI IT			
	 M3 COMFORT							
	 RS7 INTELLI IT		 RS7 INTELLI IT Validation clinique spécifique pour les personnes obèses ⁽³⁰⁾			 RS7 INTELLI IT	 RS2	 RS4
	 RS4					 RS4		