

## PG- PAINGONE PLUS

Groupe : **PainGone TENS pen**

Sous-groupe :



### PainGone Plus

SOULAGEZ VOS DOULEURS AU QUOTIDIEN:

- \* Solution contre les douleurs chroniques et aiguës
- \* Thérapie d'électrostimulation musculaire
- \* Prouvé scientifiquement
- \* Appareil médical de classe 2a
- \* Soulage la douleur rapidement et efficacement
- \* Sans médicament
- \* Soulagement instantané
- \* Sans accoutumance
- \* Fonctionne au travers de vêtements légers
- \* Utilisation aussi fréquente que nécessaire
- \* Rapide et facile: pour une utilisation à domicile

\* Fonctionnement automatique:

1. Prenez le Paingone dans votre main
2. Assurez-vous de bien entourer la zone métallique avec votre paume
3. Placez le Paingone en contact avec la zone douloureuse (en cas de maux de tête, placez le sur le bas du cou)
4. Maintenez le bouton orange enfoncé pendant 30 secondes
5. Répétez autant de fois que nécessaire

\* Contre-indications:

1. Femmes enceintes
2. Personnes portant un pacemaker ou implant électrique
3. Personnes épileptiques
4. Personnes souffrant de problèmes cardiaques

\* CODE ACL: 6084660

\* CNK CODE: 3697950

Emballage	Quantité	code EAN	L(mm)	l(mm)	H(mm)	Kg
PIECE	1	5060035703876	183	46	96	0,15
PALET	1000	85060035703889	1200	800	1800	120

Garantie (mois): **24**

Tarif Douanier: **90189075**

Nombre batteries: **1xAAA**

Batteries Inclus

Alimentation: