

Aerosure - Instructions d'utilisation

**Revitive**

Mise à jour il y a 2 ans

^ Étape 1 : Avant Utilisation

Revitive Aerosure a été spécialement conçu pour les utilisateurs privés. Avant toute utilisation, veuillez lire les contre-indications et les avertissements.


Veuillez vous assurer de procéder à toutes les vérifications suivantes avant chaque utilisation de Revitive Aerosure

- Vérifiez que la tête à valve (B) et l'embout buccal (A) sont bien en place.
- Veillez à ce que le passage entre l'embout buccal (A) et l'évent (E) soit à la fois propre et sec. Si ce n'est pas le cas, nettoyez le produit [voir page 22].
- Vérifiez qu'aucune obstruction d'aucune sorte ne bloque le passage entre l'embout buccal (A) et l'évent (E). En cas d'obstruction, nettoyez le produit [voir page 22].


^ Étape 2 : Alimentation de Revitive Aerosure

IMPORTANT: Avant de l'utiliser pour la première fois, le produit doit être complètement chargé, environ 12 heures. La prise du chargeur permet d'isoler l'appareil du réseau électrique. Ne placez pas la prise ou le chargeur dans un endroit où il est difficile de les débrancher du secteur.

- Branchez le chargeur (D) sur une prise électrique.
- Placez la poignée (C) sur le socle de charge. [voir illustration 2].

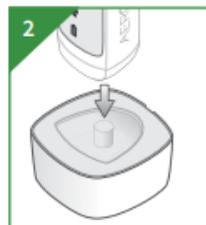

- Les témoins lumineux de modes (G) (H) clignotent plusieurs fois l'un après l'autre pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. [voir illustration 3].

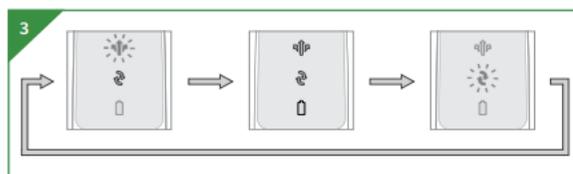

- Revitive Aerosure est en charge. Une fois l'appareil complètement chargé, les témoins lumineux clignoteront simultanément pendant dix minutes. Passé ce délai, le produit s'éteindra automatiquement pour préserver la durée de vie de la batterie et aucun témoin lumineux ne sera éclairé.
- Avant de l'utiliser pour la première fois, le produit doit être complètement chargé : environ 12 heures.
- Une pleine charge représente environ une heure et demie d'utilisation.

↗ Étape 3 : Utilisation de Revitive Aerosure

IMPORTANT: N'obstruez jamais l'évent (E).

- Tenez le produit de sorte que la partie inférieure de la poignée (C) se trouve au creux de votre main, les boutons et l'embout buccal tournés vers vous.
- Placez l'embout buccal (A) dans votre bouche en veillant à ce que vos lèvres recouvrent la collerette extérieure pour assurer l'étanchéité.
- Utilisez Revitive Aerosure conformément aux instructions décrites dans les deux pages ci-après selon le mode d'utilisation choisi.



Mode d'évacuation du mucus :

Mettez l'appareil sous tension en maintenant le bouton d'alimentation appuyé pendant 2 secondes [voir illustration 5].



Le témoin de Mode d'évacuation du mucus s'allume alors [voir illustration 6].

- Vous entendrez également le moteur et la tête à valve qui commencent à tourner
- Placez l'embout buccal (A) dans votre bouche
- Respirez 15 à 20 fois à travers l'embout buccal (A) puis retirez le dispositif de votre bouche et soufflez ou toussiez pour aider à dégager le mucus comme d'habitude.
- Il est important de retirer Revitive Aerosure de votre bouche avant de tousser et d'évacuer le mucus. N'essayez pas d'évacuer le mucus décollé en toussant à travers l'embout buccal (A)

Mode de respiration facilitée :

Mettez l'appareil sous tension en maintenant le bouton d'alimentation appuyé pendant 2 secondes [voir illustration 5].

- Appuyez une fois de plus sur le bouton d'alimentation.
- Vous entendrez également le moteur et la tête à valve qui commencent à tourner.
- Le témoin de Mode de respiration facilitée s'allume alors [voir illustration 7].



- Placez l'embout buccal (A) dans votre bouche
- Respirez aussi profondément que possible à travers l'embout buccal (A) pendant cinq minutes, deux à trois fois par jour.
- Une fois la session terminée, éteignez le dispositif en appuyant sur le bouton d'alimentation (F) pour passer par les différents modes jusqu'à ce que le moteur s'arrête

REMARQUE : Il n'y a pas de voyant séparé pour indiquer que l'appareil est éteint (OFF). L'appareil est hors tension lorsqu'il n'y a plus aucun voyant allumé.

^ Étape 4 : Rechargement de Revitive Aerosure



- Si la batterie rechargeable est faible, le témoin rouge de faible charge (I) clignotera pendant l'utilisation du produit [voir illustration 8]. Cessez d'utiliser le produit et mettez-le en charge.
- Si la batterie rechargeable est vide, le moteur s'arrêtera et Revitive Aerosure ne réagira pas à l'actionnement du bouton d'alimentation ; il faudra alors le recharger

- Une charge complète prend environ douze heures.

^ Étape 5 : Nettoyage et rangement


Il est recommandé de nettoyer l'embout buccal (A) et la tête à valve (B) après chaque utilisation, conformément aux instructions ci-après.

Pour les utilisateurs qui souffrent actuellement d'une maladie respiratoire chronique (p. ex. fibrose kystique ou bronchopneumopathie chronique obstructive), ou qui sont sujets aux infections pulmonaires récurrentes, ou encore qui présentent une déficience immunitaire, il est recommandé de faire tremper l'embout buccal (A) et la tête à valve (B) dans une solution désinfectante douce après chaque utilisation.

Pour les autres utilisateurs, il est recommandé de faire tremper l'embout buccal (A) et la tête à valve (B) dans une solution désinfectante douce au moins une fois par semaine.

^ Désinfection de la tête


Préparez une solution désinfectante adaptée conformément aux instructions du fabricant du désinfectant. La solution désinfectante doit convenir à une utilisation sur un équipement destiné à être en contact avec la bouche. Retirez l'embout buccal (A) et la tête à valve (B) de la poignée (C), et placez l'embout buccal et la tête à valve dans la solution désinfectante. Immergez entièrement la tête à valve et remuez-la pour enlever les bulles d'air [voir illustration 9].

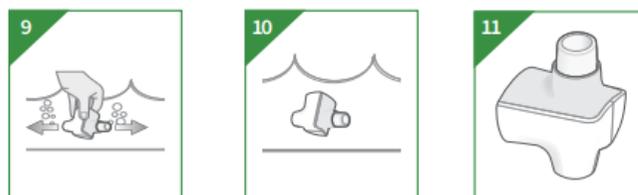

Laissez tremper la tête à valve dans la solution pendant la durée minimale indiquée sur la solution désinfectante [voir illustration 10].

Une fois le temps écoulé, retirez l'embout buccal et la tête à valve de la solution, rincez à l'eau claire puis égouttez. Laissez sécher à l'air pendant au moins deux heures. Pour garantir un séchage complet de la tête, placez-la en équilibre sur l'évent [voir illustration 11].

^ Nettoyage de la tête

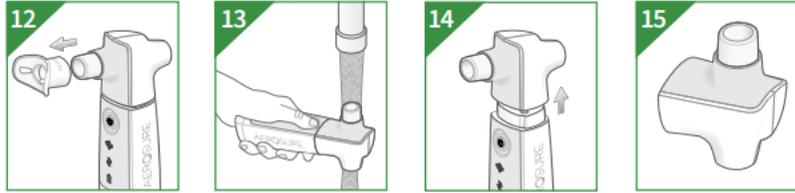

Retirez l'embout buccal (A) de la tête à valve (B) et rincez à l'eau chaude courante (environ 40 °C) [voir illustration 12].

Alors que la tête à valve est en place sur la poignée (C) et que Revitive Aerosure est allumé, rincez la tête à valve sous l'eau chaude courante de sorte que la tête à valve et ses composants internes soient complètement nettoyés [voir illustration 13].

Prenez soin de ne pas mettre la poignée sous l'eau courante.

Retirez la tête à valve de sous l'eau courante et laissez-la se vider en laissant tourner le moteur. Éteignez le produit et retirez la tête à valve [voir illustration 14]. Secouez la tête à valve et l'embout buccal pour éliminer toute l'eau restante et laissez-les sécher complètement avant de les remonter. Pour aider à évacuer toute l'eau résiduelle de la tête à valve, placez-la en équilibre sur l'évent (E) le temps qu'elle sèche [voir illustration 15].

La poignée et le chargeur (débranché de l'alimentation secteur) doivent être nettoyés si besoin, uniquement à l'aide d'un chiffon humide.

IMPORTANT: Aucune pièce de Revitive Aerosure ne convient à un lavage au lave-vaisselle.

^ Têtes de rechange

Des têtes à valve de rechange sont disponibles pour votre Revitive Aerosure et il est conseillé de remplacer la tête à valve au moins une fois tous les 6 mois.

Des têtes de rechange sont disponibles à l'achat chez votre revendeur local Revitive Aerosure, ou sur le site Internet de Revitive.

Lors de votre demande, veuillez indiquer la référence de pièce suivante. Tête de rechange Revitive Aerosure Réf 3466.

^ Stockage Revitive Aerosure

Rangez-le dans un endroit sec et sans poussière, à une température comprise entre -18°C et 50°C, avec une humidité relative de 25% à 85%.

Information sur l'environnement (batterie)

Ce produit contient des piles rechargeables. Dans le souci de protéger l'environnement, merci de ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers à la fin de sa durée d'utilité. La mise au rebut peut s'effectuer soit en renvoyant le produit à votre distributeur local, soit en l'amenant à un centre de recyclage ou une déchèterie, conformément à la réglementation locale.